

# FlowSecure™

Künstlicher Blasenschließmuskel

## Einstellung des Systemdrucks

### WICHTIGE HINWEISE

**Beim injizieren die Wände der Pumpe nicht mit der Nadel beschädigen!**  
Die Nadel immer parallel zu den Pumpenwänden führen!

**Nur kurze Nadeln verwenden!**  
Empfohlen: 25G 5/8" (0,5 x 16 mm), orange

### Benötigtes Material

- Steriler Verbandstoff
- Sterile Handschuhe
- Desinfektionsmittel, z.B. Chlorhexidingluconat-Lösung
- Sterile isotonische Kochsalzlösung (NaCl 0,9%)
- Sterile Spritze 10 ml
- Sterile Nadel, 25G 5/8" (0,5 x 16 mm), orange

### Durchführung

#### 1. Lagerung des Patienten

Bringen Sie den Patienten in die Rückenlage.

#### 2. Spritze vorbereiten

Benötigtes Volumen an Kochsalzlösung in die 10 ml Spritze aufziehen.

#### 3. Reinigung und Desinfektion

Hinweis: Aufgrund der besonderen Gegebenheiten im Aktionsbereich muss eine extrem sorgfältige Desinfektion durchgeführt werden

#### 4. Injektionsstelle vorbereiten

- Pumpe ergreifen und die Haut straff über das Ende der Pumpe (Injektionsport) ziehen.
- Desinfektionsmittel an der Injektionsstelle mit Kochsalzlösung entfernen.
- Trocknen der Injektionsstelle

#### 5. Injektionsvorgang

- Entlüften der Spritze
- Spritze ansetzen (zentriert zum Port und parallel zum Pumpenkörper)
- Nadel durch die Haut, **nicht in die Pumpe**, stechen.  
Um Gewebe- und Blutpartikel aus der Nadelspitze zu entfernen, 0,1 ml NaCl-Lösung zwischen Haut und Port spritzen.
- Nadel durch den Port in die Pumpe stechen und darauf achten, dass die Nadel immer parallel zum Pumpenkörper ausgerichtet bleibt.
- Benötigtes Volumen injizieren und Nadel entfernen

